

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению pessария урогинекологического доктора Шнейдермана  
по ТУ 9398-084-18037666-2014

**1. НАЗНАЧЕНИЕ:** pessарий урогинекологический доктора Шнейдермана предназначен для лечения опущения органов малого таза, а также стрессового недержания мочи у женщин.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** pessарий изготавливается из силиконовой резиновой смеси МС по СТП МС №1-93 и выполнен в виде кольца с четырьмя наружными вырезами. Масса pessария – не более 40 г. Твердость по Шору А – не менее 55 ед. Относительное удлинение при разрыве - 0%. Стойкость к сопротивлению сжатия.

**3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** pessарий используется при опущении тазовых органов, опущении передней стенки влагалища (цистоцеле, уретроцеле), задней стенки влагалища (ректоцеле), опущении шейки матки до влагалищного входа и за его пределы (вагинальный пролапс или пролапс матки), стрессовом недержании мочи (при кашле, чихании, поднятии тяжестей).

**4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** воспалительные заболевания гениталий; декубительная язва; кровянистые выделения из половых путей; инфекции мочевыводящих путей; эрозия шейки матки; наличие в анамнезе оперативного вмешательства на мочевыводящих путях и влагалище за последние 6 месяцев; гепатиты В и С; ВИЧ инфицированность; инфекции, передаваемые половым путем.

**5. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ:** первое время после введения pessария могут наблюдаться явления дискомфорта, чувство распирания во влагалище, усиление влагалищных белей. Эти явления проходят через один-два дня после введения pessария.

**6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** в качестве лубриканта использовать гель на водной основе или детский крем. Нельзя применять вазелин, разрушающий силикон. Необходимо не реже, чем 1 раз в 3 месяца, проходить профилактический осмотр у гинеколога. Развитие воспалительного процесса при применении pessария требует временного его удаления и санации

влагалища. Для профилактики воспалительных осложнений необходимо соблюдение рекомендаций врача, гигиены и соблюдение сроков непрерывного ношения пессария. Запрещается использовать изделие, если истек срок годности.

**7. ПОРЯДОК РАБОТЫ:** установку пессария первоначально производит врач в амбулаторных условиях и обучает женщину технике введения и удаления пессария. Следует расположить пессарий вертикально у входа во влагалище и, нажав двумя пальцами на наружные вырезы пессария, ввести его в вертикальном положении во влагалище. В верхней части влагалища развернуть пессарий в косопоперечной плоскости по отношению к продольной оси тела, при этом шейка матки должна располагаться в центральном отверстии пессария. Техника извлечения пессария обратна введению. Оптимальное время непрерывного использования пессария от 20 до 25 дней, после чего женщина вечером самостоятельно извлекает пессарий, промывает его теплой водой и утром снова вводит во влагалище на следующие 20-25 дней.

**8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:** транспортирование производится при температуре не ниже минус 50°C и не выше плюс 40°C и относительной влажности до 98%. Хранение производится при температуре от плюс 5°C до плюс 35°C и относительной влажности воздуха до 75%.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:** изготовитель гарантирует соответствие пессария требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок годности пессариев, включая срок хранения и эксплуатации – 5 лет с даты изготовления.

**10. СТЕРИЛИЗАЦИЯ:** стерилизация осуществляется окисью этилена.

**11. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ:** утилизация пессариев проводится по СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б.

Патент РФ на полезную модель №142309, №180160

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 41А.

Дистрибьютор: ООО «ЭКО ПЛЮС», Россия, 129085, Москва, проспект Мира д. 101Б.

Тел. +7 (495) 223-89-80

E-mail: info@pdsn.ru

www.pdsn.ru